



Výsledek měření glykémie je nižší než 1,1 mmol/l anebo se vyskytl problém s testovacím proužkem.
*Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.



Výsledek měření glykémie je 16,7 mmol/l anebo vyšší - zobrazí se hlášení KETONES.
*Pokud je součástí vašeho glukometru měření β -ketonů v krvi, tak se doporučuje toto měření vykonat.



Chyba glukometru.
*Vyměňte glukometr a zopakujte předcházející kroky.



Výsledek měření glykémie je vyšší než 27,8 mmol/l anebo se vyskytl problém s testovacím proužkem.
*Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.



Teplota je příliš vysoká anebo příliš nízká, systém proto nefunguje, jak by měl.
*Přeneste glukometr a testovací proužky na místo s provozní teplotou. V případě, že je zobrazena ikona baterie, vyměňte baterii CR2032.



Možný problém s testovacím proužkem.
*Zkontrolujte správnost postupu měření. Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.

Optium Xceed

Zobrazené symboly a hlášení



Hladina glykémie je příliš vysoká a přístroj ji není schopen změřit anebo mohl nastat problém s testovacím proužkem.
*Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.



Chyba kalibračního / testovacího proužku
*Opakujte kalibraci s kalibračním proužkem z balení, které právě používáte. Zkontrolujte:
- nastavení data a času
- datum expirace test. proužků
- správnost postupu kalibrace



Chyba glukometru.
*Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.

Podrobný návod na použití a další důležité informace najdete v uživatelské příručce systému Optium Xceed a v návodu na použití testovacích proužků Optium Plus na měření glykémie a Optium β -ketone na měření ketoacidózy.



Krev jste nanesli na testovací proužek příliš brzo. Možný problém s testovacím proužkem.
*Zkontrolujte správnost postupu měření. Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.



Chyba testovacího proužku. Testovací proužek je poškozený, použitý, anebo ho glukometr nedokáže rozeznat.
*Zkontrolujte správnost postupu měření. Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.



Chyba glukometru.
*Zopakujte měření s novým testovacím proužkem.

Pokud se tato chybová hlášení zobrazí znovu, okamžitě se obraťte na profesionální zdravotnický personál.

Zákaznický servis
800 189 564